

## MASCARETA QUIRÚRGICA

### Descripció



Producte sanitari que proporciona una barrera per minimitzar la transmissió d'agents infecciosos procedents de la persona que la porta.

També pot protegir l'usuari d'esquitxades i fluids potencialment contaminants.

### Quan la faré servir?

- Durant els desplaçaments a la feina i en tornar-ne. A la via pública i al transport públic.
- En els desplaçaments amb vehicles, quan hi hagi més d'un passatger.
- En reunions i desplaçaments per la universitat, quan no es pugui assegurar la distància física.
- Sempre que no es pugui mantenir la distància física entre persones de 2 metres.
- En presència d'una persona positiva per CoViD-19 o bé amb simptomatologia associada a aquesta malaltia.
- Sempre que es vulgui assegurar un plus de protecció davant d'una possible infecció.

### Com s'ha de posar i treure?

La seqüència de col·locació i retirada de la mascareta quirúrgica és la següent:

- Renteu-vos les mans.
- Localitzeu la vora superior de la mascareta, que normalment duu una tira metàl·lica.
- Subjecteu la mascareta per les dues cintes o llaçades superiors, bo i mantenint la vora superior sobre el pont nasal. En cas de portar gomes, ajusteu-les a les orelles de la mateixa manera.
- Passeu les dues cintes superiors per sobre de les orelles i lligueu-les sobre la part superior del cap. Cordeu les dues cintes inferiors al voltant del coll perquè la mascareta s'ajusti bé a la part inferior de la barbeta.
- Ajusteu la part superior de la mascareta al pont nasal doblegant la tira metàl·lica.
  
- Per retirar la mascareta, descordeu les cintes inferiors, bo i tenint cura que no caigui.
- Descordeu les cintes superiors i retireu-la de la cara, subjectant sempre la mascareta per les cintes. Eviteu el contacte de les mans amb la part externa.
- Renteu-vos les mans.